



# CAVI-LIPO GT



※都合により、デザインの変更などをする可能性があります。

# CAVI-LIPO GT

## キャビテーションとは


水中に特殊な超音波を照射することにより、極めて小さな気泡や空洞ができたり、消えたりする現象です。そしてこの気泡が弾けるとき、瞬間的にその部分に熱が発生すると言われています。その際のエネルギーが、脂肪やセルライトへ効果的に働きかけます。



## キャビテーションとは

キャビテーションは、多数の気泡を体内に発生させ、その気泡の消滅によって脂肪の乳化を促します。


※下記の図では、気泡の変形を示しています。

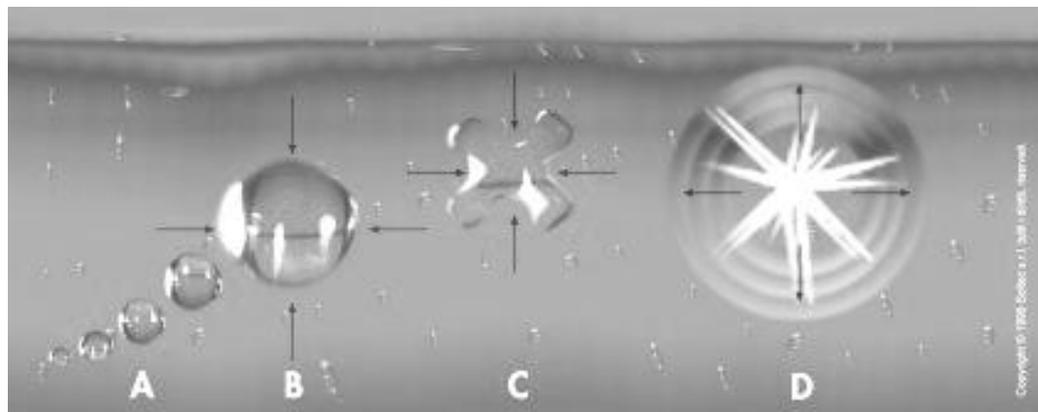


- A. 気泡が形成され、拡大します。
- B. 気泡の拡大段階です。
- C. 気泡は内破を起こします。
- D. 気泡は完全に消滅します。

キャビテーションの気泡は非常に小さく、効果的に脂肪の乳化促進することが可能です。

従来の超音波の気泡

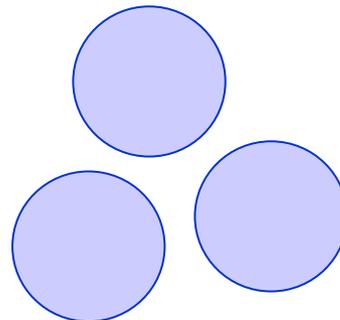

キャビテーションの気泡

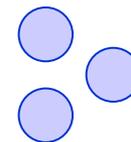

# CAVI-LIPO GT

## 乳化実験(水と油)

### 水と油の乳化

キャビテーションは、乳化をしないと意味がありません。簡単な確認方法として、水と油での乳化実験がその一つです。


通常水と油は、粒子の大きさが異なるので、決して混ざり合う事はありません。

容器に水をはり、油を少量入れたら、水面に「Cavi-Lipo GT」のヘッドをあてます。

キャビテーションシステムによって、即座に油と水が混じり合っていきます。これを乳化といいます。2分ほどで容器の中の水は真っ白に濁ります。

※この実験を、この場でご覧頂けます。

### 脂肪を柔らかくし、エマルジョン(乳化)の状態に

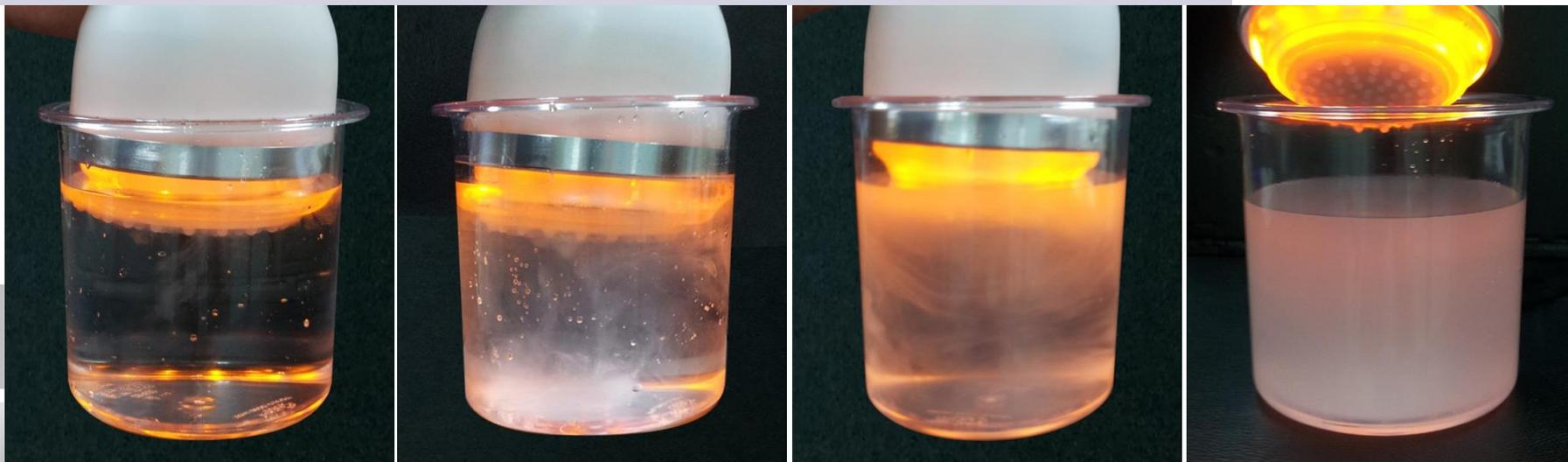

30秒後

1分後


2分後

「脂肪やセルライトを柔らかくし、乳化させ、流す」ことで  
ぽっこりお腹やたるんだ二の腕・ヒップ、背中など、スリムなBODYに近づきます。 4


## キャビテーションの効果

セルライトは代謝の低下・老廃物の蓄積など、体内の循環に悪影響を及ぼします。Cavi-Lipo GTは強力なパワーで脂肪乳化を行い、脂肪減少とセルライト除去による老廃物のスムーズな排泄に効果を発揮することで、ボディラインを整えていきます。


### 《 キャビテーションでの変化 》

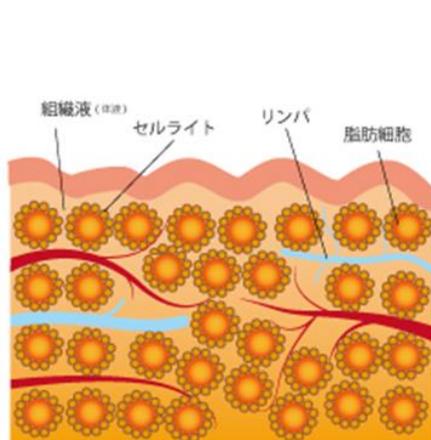

脂肪細胞にセルライトが付着している様子。大量のセルライトが血管を圧迫し、代謝を悪くしている。

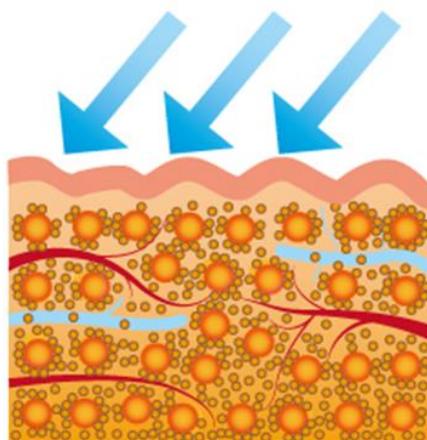

キャビテーションにより、脂肪細胞からセルライトがはがれ落ち、はがれたセルライトは乳化作用によりリンパ液の中へ。

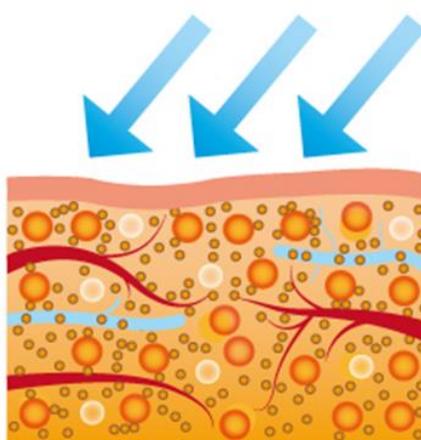

セルライトが乳化され、リンパの中へ流れ、血液の循環がスムーズに！また、キャビテーションにより脂肪が乳化し始めていきます。



吸引やマッサージで乳化した脂肪をリンパへ促し、施術部分のサイズダウンに貢献します。

## Cavi-Lipo GTの周波数は25KHz

キャビテーションの特徴は、従来の超音波(1MHzや3MHz)に比べて非常に低いヘルツを用いることです。

キャビテーションが起こる周波数は、20KHz～70KHzと言われており、周波数が低いほど、よりキャビテーション効果を発揮します。

それにともなって、キーンと不快なノイズが響き渡ります。

なぜなら…  
キャビテーションで用いられるヘルツは、人の耳に聞こえる音に限りなく近い音(20Hz～20KHz)と言われているからです。


Cavi-Lipo GTは  
キャビテーションを搭載しています。

通常の  
キャビテーションは、  
キーンと頭に響く  
ノイズ音がかなり  
不快に感じます…

お客様の足を遠ざける  
一つの要因になっています。



## 従来の超音波との比較

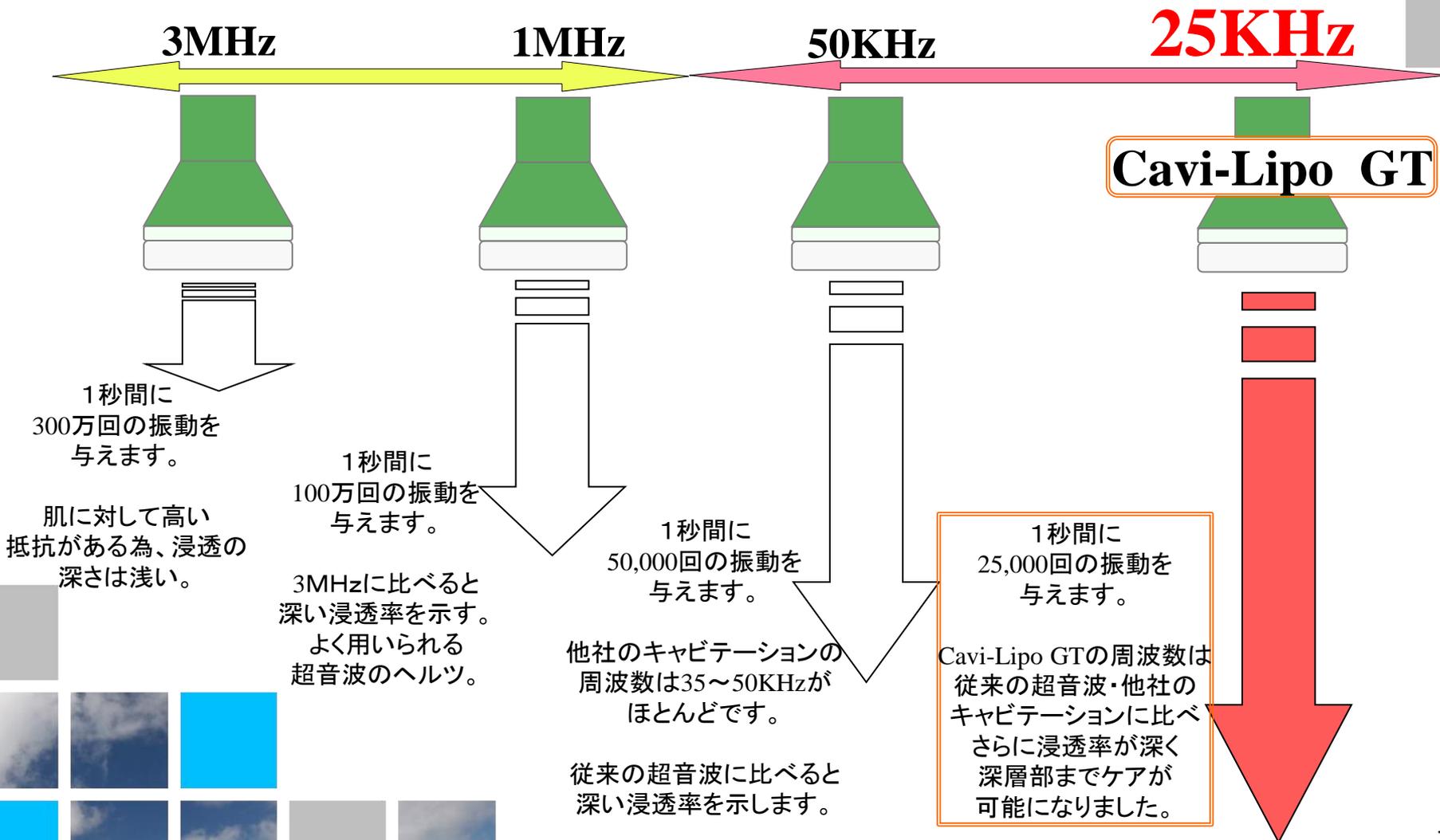

# CAVI-LIPO GT

## 特殊なヘッド

他社の機器にはない『 Cavi-Lipo GT 』だけの特殊ヘッドを搭載

あの頭の中に響き渡る、キーンという不快なノイズを大幅に軽減！

## キャビテーション



特殊シリコン製ヘッド！（特許出願中）  
突起のついたヘッドで  
マッサージ効果もあります。

# CAVI-LIPO GT

## LIGHT THERAPY (ライトセラピー)

### POINT

①キャビテーション後のドレナージュ効果をUP  
赤色LED: 血行促進

②トリートメントしながらボデイスキンをクリーニング  
黄色LED: 美白



赤色LED  
618～635nm




黄色LED  
584～588nm

# CAVI-LIPO GT

## トリートメントの流れ

ヒート  
マット  
システム

体を温める程度

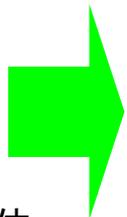

## ZERO BODY

(EMS) 代謝を高め、  
ボディラインを引き締めます。



## リンパマッサージ

ドレナージュで  
排泄を促します。

トリートメント最後に発汗がベスト！  
(ヒートマット、遠赤ドームetc…)



## 禁忌事項

- ペースメーカーを装着されている方。
- 体に金属が入っている方。(ボルト、インプラント)
- 肌トラブルがある方。
- 妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方。
- 授乳中の方。
- 体調がすぐれない場合。(生理中など)
- お顔(頬骨より上)・バストのトリートメントは避けてください。

※原則として、通院や治療中などがある場合は、お医者様の確認をお願い致します。

# CAVI-LIPO GT



※都合により、デザインの変更などをする可能性があります。

WORLD ASSOCIATES

株式会社 ワールドアソシエイツ

<http://www.worldassociates.co.jp>

本社	〒160-0022	東京都新宿区新宿1-36-2	新宿第7葉山ビル6F	TEL:03-5269-1931
神戸営業所	〒651-0094	神戸市中央区琴ノ緒町5-5-8	M'Sタワー5F	TEL:078-261-8651
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2-1-10	ORE福岡赤坂ビル5F	TEL:092-737-81842